

Avviso! Questo simbolo indica informazioni importanti relative alla sicurezza. Seguire attentamente queste istruzioni.



Leggere il Manuale d'uso prima dell'utilizzo! È importante comprendere appieno il contenuto del manuale d'uso prima di tentare di utilizzare l'apparecchiatura.

CE

30-10-2020

Numero documento: M10-060IT rev. 01

Uso previsto

Tavolo servitore per il posizionamento di attrezzature e strumenti chirurgici utilizzati durante gli interventi chirurgici. Il prodotto deve essere utilizzato da medici professionisti all'interno di una struttura medica.




Norme di sicurezza

Carico massimo: 2,5 kg con una distribuzione uniforme, secondo le norme EN 60601-1 ed EN 60601-2.


Prima dell'uso, assicurarsi che l'apparecchiatura funzioni correttamente!

Quando si allenta la leva di blocco per regolare l'altezza, sostenere il tavolo servitore da sotto per evitare che scenda in maniera incontrollata nella posizione inferiore.

Le attività di assistenza e manutenzione preventiva devono essere eseguite da personale autorizzato.

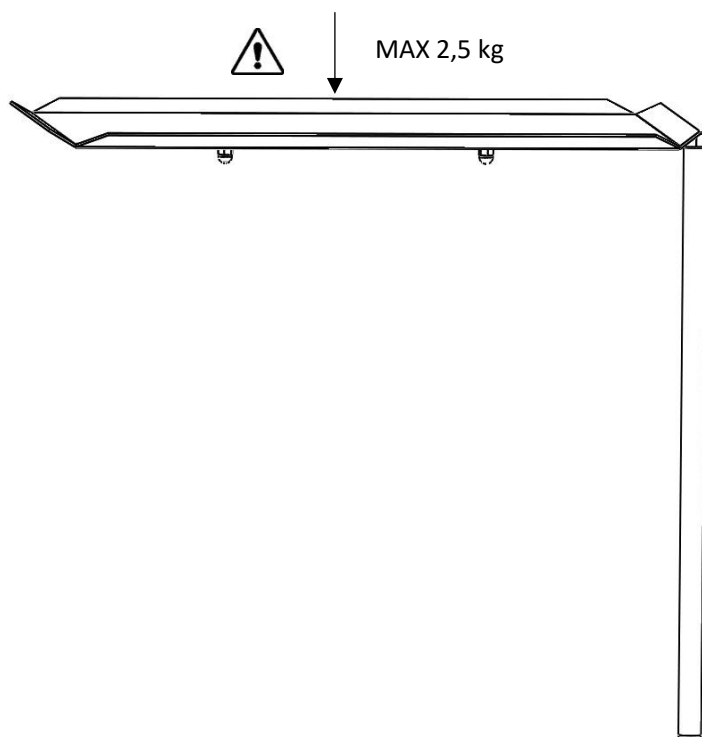

Installazione

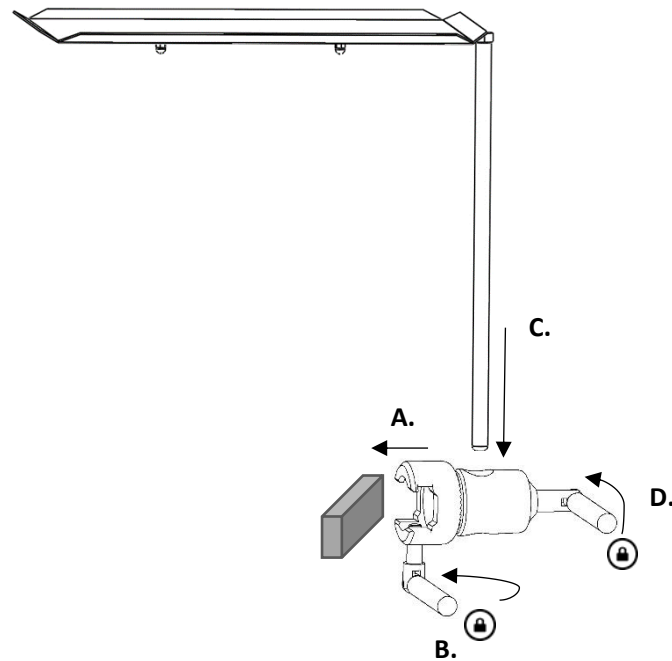

Manutenzione

Le attività di assistenza, manutenzione preventiva, regolazione e riparazione devono essere eseguite unicamente da personale autorizzato. È severamente vietato alterare la struttura senza un consenso scritto da parte del produttore.


Pulizia

Pulire con un detergente antisettico avente un pH di 6 – 8 e acqua tiepida. Si può utilizzare l'etanolo. Asciugare con un panno morbido. Non utilizzare detergenti acidi o alcalini forti.

Controllo

Controllare che non vi siano danni a nessuna parte del tavolo servitore. Controllare e, se necessario, stringere il dado a cupola che fissa il vassoio al supporto.

Pezzi di ricambio

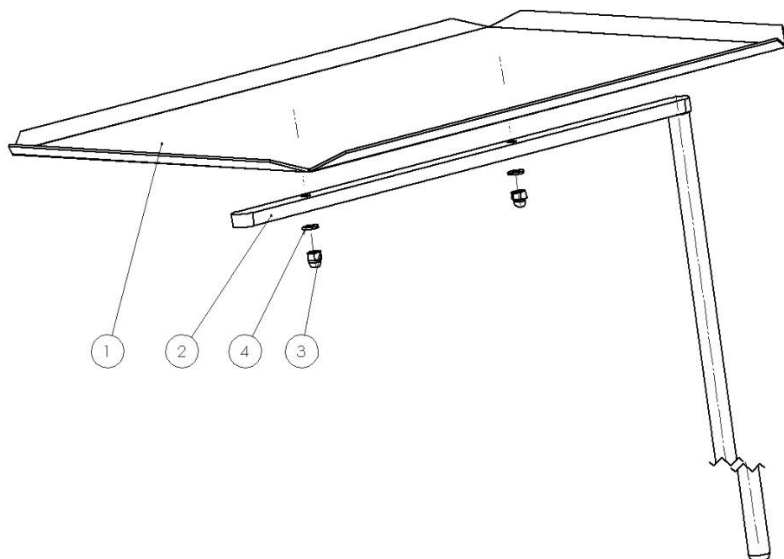

N.	Descrizione	Pz.	Articolo n.
1.	Vassoio portastrumenti	1	11217
2.	Supporto	1	11215
3.	Dado a cupola M6 A2	2	-
4.	Rondella BRB 6,4x12x1,5 A2	2	-

Accessori

Articolo n.	Descrizione
10-304	Morsetto radiale per il fissaggio alla guida accessori del tavolo operatorio
10-305	Morsetto radiale per il fissaggio alla guida accessori del tavolo operatorio

Specifiche tecniche

Carico di lavoro massimo	2,5 kg con una distribuzione uniforme, secondo le norme EN 60601-1 ed EN 60601-2
Peso	2,9 kg
Materiale	Acciaio inox
Dimensioni (A x P x L)	470 x 400 x 500 mm
UDI-DI	07350111830328



Reison Medical AB

Eriksbergsvägen 32A

734 92 Hallstahammar

SVEZIA

+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se