



	Käsinoja:	10-380	10-380-K	10-380-F	10-380-L	10-380-M	10-380-M10	10-380-S30
<b>Tuotenro</b>	<b>Kuvaus</b>							
10-181	Tasainen comfort-pehmuste					x	x	
10-182	Kaareva comfort-pehmuste					x	x	
10-381	Tasainen muotoiltu pehmuste	x		x	x			x
10-381-H	Tasainen comfort-pehmuste	x		x	x			x
10-382	Kaareva muotoiltu pehmuste	x		x	x			x
10-382-H	Kaareva comfort-pehmuste 45 mm	x		x	x			x
10-382-HT	Kaareva comfort-pehmuste 70 mm	x		x	x			x
10-382-K	Kaareva comfort-pehmuste, lyhyt		x					



Lue käyttöohje ennen käyttöä! On tärkeää ymmärtää käyttöohjeen sisältö, ennen kuin yrität käyttää laitetta.



2020-10-30

Asiakirjan numero: M10-181FI rev.01

## Käyttötarkoitus

---

Pehmuste on tarkoitettu käsinojiin, joilla tuetaan potilaan käsivarsia ja parannetaan potilasmukavuutta leikkauksen aikana. Tuote on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön terveydenhuollon yksikössä.

## Käyttöohjeet

---

### Puhdistaminen

Puhdista antiseptisellä pesuaineella (pH 6–8) ja lämpimällä vedellä. Pyyhi kuivaksi pehmeällä liinalla. Älä käytä voimakkaasti hapanta tai emäksistä pesuainetta.

### Tarkistaminen

Tarkista ennen käyttöä, että pehmuste on puhdas ja ehjä.

## Tekniset tiedot

---

Versio	Kuvaus	UDI-DI	Mitat (K x L x P)	Paino	Materiaali
10-181	Pehmuste	07350111831899	45 x 180 x 610 mm	0,32 kg	Mfoam
10-182	Pehmuste	07350111831905	65 x 180 x 610 mm	0,33 kg	Mfoam
10-381	Pehmuste	07350111831936	35 x 165 x 610 mm	0,70 kg	Polyuretaani
10-381-H	Pehmuste	07350111831943	45 x 180 x 610 mm	0,32 kg	Mfoam
10-382	Pehmuste	07350111831950	25 x 180 x 610 mm	0,80 kg	Polyuretaani
10-382-H	Pehmuste	07350111831967	45 x 180 x 610 mm	0,30 kg	Mfoam
10-382-HT	Pehmuste	07350111831998	80 x 180 x 610 mm	0,50 kg	Mfoam
10-382-K	Pehmuste	07350111832018	45 x 180 x 455 mm	0,20 kg	Mfoam



Reison Medical AB  
Eriksbergsvägen 32A  
734 92 Hallstahammar  
RUOTSI

+46 (0)220 433 99 | [order@reison.se](mailto:order@reison.se) | [info@reison.se](mailto:info@reison.se)