



Variant	Beskrivning
10-383	Armbordsrem 60 cm
10-383-L	Armbordsrem 73 cm



Läs användarmanualen innan du börjar använda produkten! Det är viktigt att du förstår innehållet fullt ut innan du försöker använda utrustningen.

CE

2021-04-15

Dokument nummer: M10-383SE rev.01

Avsedd användning

Rem avsedd att användas i kombination med armbord för att fixera patientens arm under operation. Produkten är avsedd att användas av professionell personal inom kirurgi på vårdinrättningar.

Användarinstruktion

Rengöring

Rengör med antiseptiskt tvåttvättmedel med pH 6 - 8 och varmt vatten. Torka med mjuk torkduk. Använd inte tvättmedel som innehåller starka syror eller baser.

Kontroll

Kontrollera innan användning att remmen inte har några skador samt att kardborrelåsningen fungerar tillfredställande.

Teknisk specifikation

Variant	Beskrivning	UDI-DI	Dimension (B x L)	Vikt	Material
10-383	Rem	07350111832025	50 x 600 mm	34 g	Polyester
10-383-L	Rem	07350111832032	50 x 730 mm	42 g	Polyester



Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
SWEDEN

+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se