

Advarsel! Dette symbol angiver vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed. Følg disse anvisninger nøje.



Læs brugervejledningen, før du tager udstyret i brug! Det er vigtigt, at du forstår indholdet i brugervejledningen fuldt ud, før du tager udstyret i brug.

CE

2021-03-03

Dokumentnummer: M10-398DK rev.01

Tilsligtet brug

Armkirurgibord beregnet til lejrning af patientens arm under kirurgiske indgreb på armen eller hånden. Produktet er beregnet til brug af læger på et hospital eller en klinik.




Sikkerhedsbestemmelser

Maksimal belastning: 32 kg jævnt fordelt, svarende til en patientvægt på 300 kg, iht. EN 60601-1 og EN 60601-2.

Kontroller, at udstyret fungerer korrekt, før du tager det i brug!


Fjern armkirurgibordet under transport!

Service og forebyggende vedligeholdelse skal udføres af autoriseret personale.

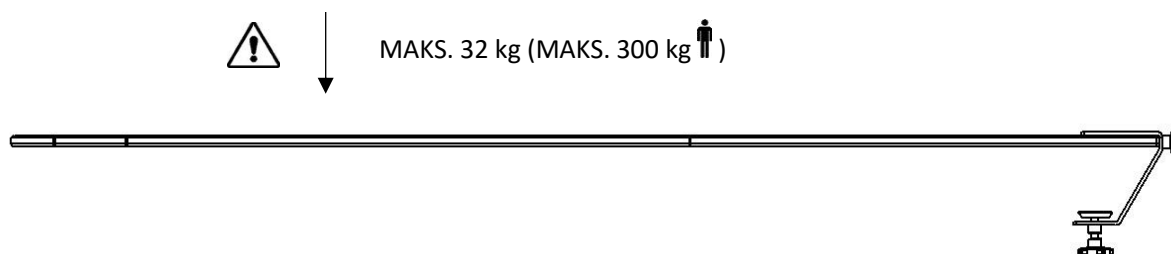

Anvisninger i brug

Installation

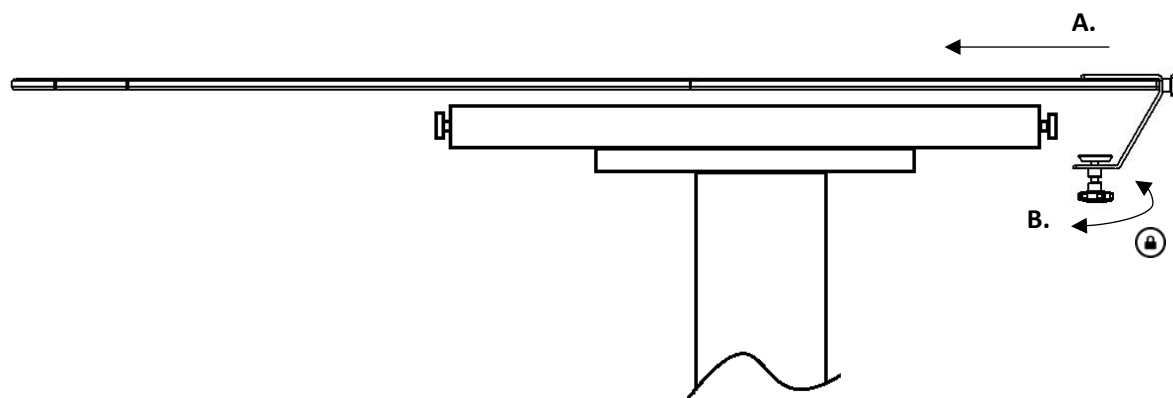

Vedligeholdelse

Service, forebyggende vedligeholdelse, justering og reparation må kun udføres af autoriseret personale. Det er strengt forbudt at ændre på konstruktionen uden skriftlig tilladelse fra producenten.

Rengøring

Rengør udstyret med antiseptisk rengøringsmiddel med pH 6-8 og varmt vand. Det er tilladt at bruge ethanol. Tør efter med en blød klud. Brug ikke stærkt sure eller basiske rengøringsmidler.


Kontrol

Kontroller, at der ikke er nogen løse dele, og at alle dele er fri for skader. Kontroller bordets låsefunktion. Kontroller, at puden er ren og fri for skader, hvis der anvendes en pude.

Årlig service

Én gang om året skal armkirurgibordet rengøres omhyggeligt, de bevægelige dele skal smøres, og låsefunktionen skal afprøves.

Reserve dele

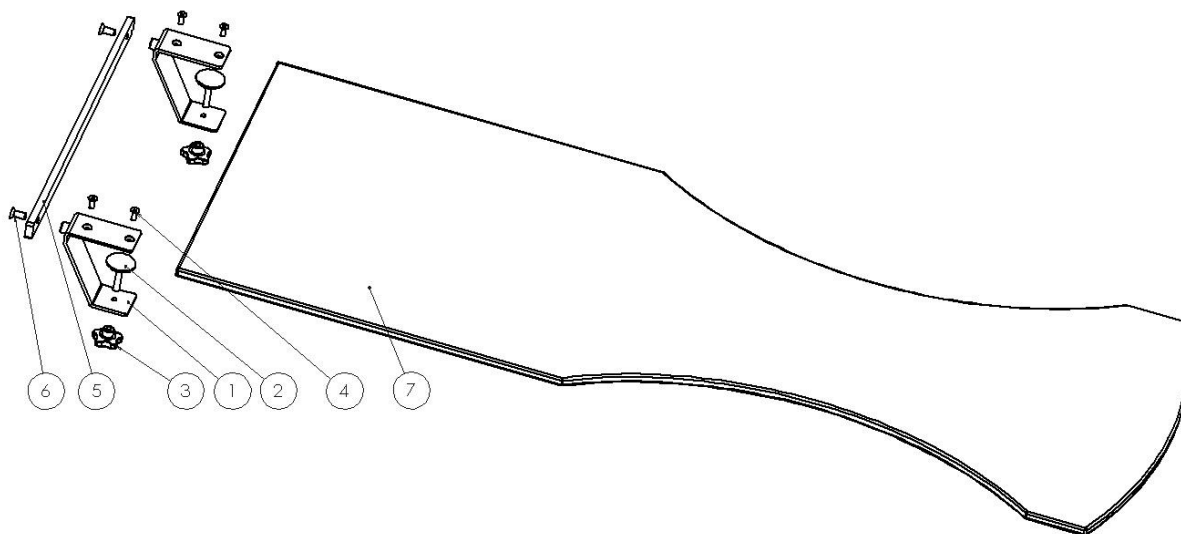

Nr.	Beskrivelse	Stk.	Varenr.
1.	Beslag	2	11427
2.	Justerbar glider	2	SF3222 M8x70S
3.	Greb	2	VC 192/40 B-M8
4.	Skrue MF6S M6x16 A2	4	-
5.	Skinne	1	11428
6.	Skrue MF6S M8x20 A2	2	-
7.	Plade	1	11384

Tekniske specifikationer

Maksimal belastning	32 kg jævnt fordelt, svarende til en patientvægt på 300 kg, iht. EN 60601-1 og EN 60601-2
Vægt	5,1 kg
Mål (H x B x L)	140 x 520 x 1370 mm
Tykkelse, plade	13 mm
Materiale, armkirurgibord	Kulfiber Rustfrit stål
UDI-DI	07350111830892



Reison Medical AB

Eriksbergsvägen 32A

734 92 Hallstahammar

SVERIGE

+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se