

Uyarı! Bu sembol, güvenlikle ilgili önemli bilgileri belirtmektedir. Bu talimatlara dikkatle uyun.



Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzunu okuyun! Ekipmanı kullanmayı denemeden önce kullanım kılavuzunun içeriğini tam olarak anlamak önemlidir.

**CE**

03-03-2021

Belge numarası: M10-398TR rev.01

## Kullanım amacı

---

Kol ve elde cerrahi tedavi sırasında hasta kolunun yerleřtirilmesi için ameliyat masası kolçađı.  
Ürün bir sađlık tesisi içinde tıp uzmanları tarafından kullanılacaktır.



## Güvenlik yönetmeliđi


---

Maksimum yük: Eřit dađılımlı 32 kg, EN 60601-1 ve EN 60601-2'ye göre 300 kg hasta ađırlıđına karřılık gelmektedir.

Kullanmadan önce, dođru şekilde çalıřtıđından emin olun!

Tařıma sırasında ameliyat masası kolçađını sökün!


Servis ve önleyici bakım yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

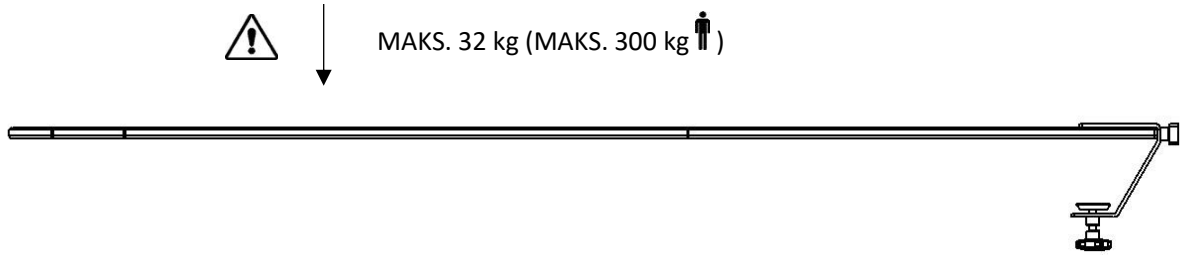

## Kullanıcı talimatları

---

### Kurulum

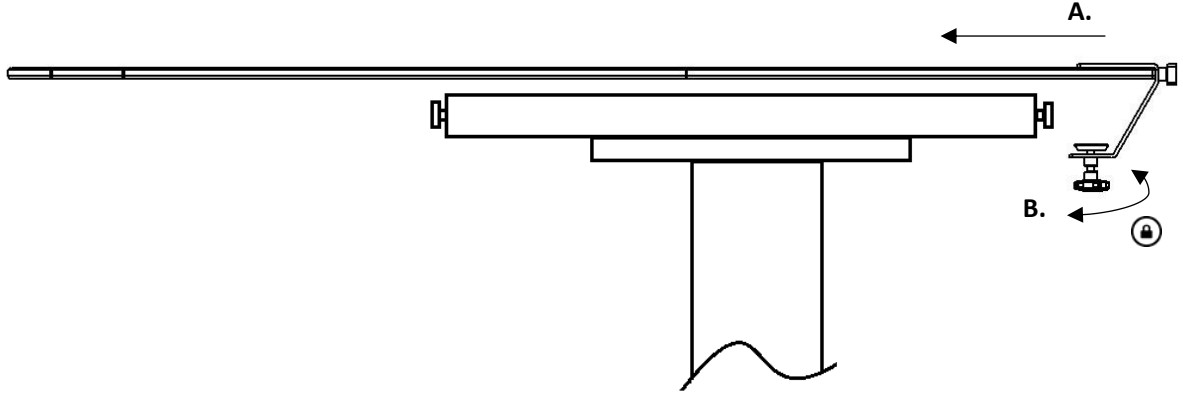

### Bakım

Servis, önleyici bakım, ayarlama ve onarım sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Üreticinin yazılı izni olmadan ürünün yapısının değiştirilmesi kesinlikle yasaktır.

### Temizleme

pH derecesi 6 - 8 olan antiseptik deterjan ve ılık su ile temizleyin. Etanol kullanılabilir. Yumuşak bir bezle kurulayın. Güçlü asidik veya alkali deterjanlar kullanmayın.

### Kontrol


Gevşek parça bulunmadığını ve herhangi bir parçada hasar olmadığını kontrol edin. Masaya kilitleme fonksiyonunu kontrol edin. Bir yastık kullanılmışsa, temiz olduğunu ve hasar görmediğini kontrol edin.

### Yıllık servis

Masa kolçağı yılda bir kez dikkatlice temizlenmeli, hareketli parçalar yağlanmalı ve kilitleme fonksiyonu test edilmelidir.

## Yedek parçalar

---

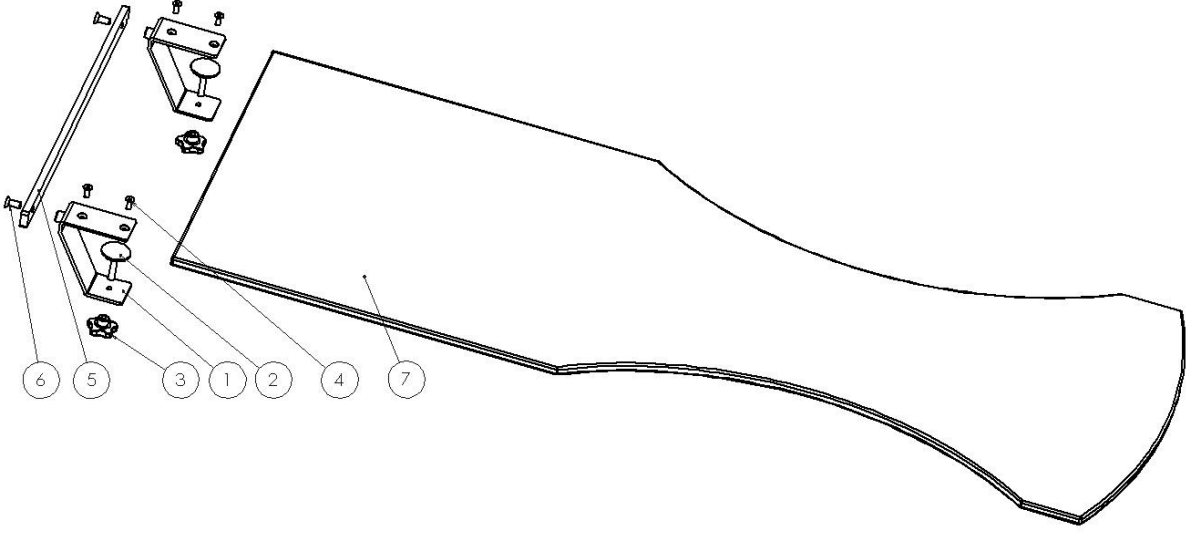

No.	Açıklama	Adet	Madde no.
1.	Dirsek	2	11427
2.	Ayarlanabilir kılavuz	2	SF3222 M8x70S
3.	Topuz	2	VC 192/40 B-M8
4.	Vida MF6S M6x16 A2	4	-
5.	Ray	1	11428
6.	Vida MF6S M8x20 A2	2	-
7.	Plaka	1	11384

## Teknik özellikler

---

Maksimum iş yükü	Eşit dağılımlı 32 kg, EN 60601-1 ve EN 60601-2'ye göre 300 kg hasta ağırlığına karşılık gelmektedir
Ağırlık	5,1 kg
Boyutlar (Y x G x U)	140 x 520 x 1370 mm
Plaka kalınlığı	13 mm
Ameliyat masası kolçağı malzemesi	Karbon fiber Paslanmaz çelik
UDI-DI	07350111830892



Reison Medical AB

Eriksbergsvägen 32A

734 92 Hallstahammar

ÍSVEÇ

+46 (0)220 433 99 | [order@reison.se](mailto:order@reison.se) | [info@reison.se](mailto:info@reison.se)