



Versio	Kuvaus
10-464	Jalkahihna, jossa pehmuste, koukku ja tarranauha
10-464-M	Jalkahihna, jossa pehmuste ja tarranauha



Lue käyttöohje ennen käyttöä! On tärkeää, että ymmärrät käyttöohjeen sisällön, ennen kuin yrität käyttää laitetta.

CE

16.4.2021

Asiakirjan numero: M10-464FI rev.01

Käyttötarkoitus

Jalkahihna potilaan jalkojen kiinnittämiseen leikkauksen aikana. Tuote on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön terveydenhuollon yksikössä.

Käyttöohjeet

Käyttö

10-464: Kiinnitä koukku toiseen sivukiskoon. Pujota tarrapää vastakkaisen sivukiskon läpi ja lukitse hihna paikalleen tarranauhalla.

10-464-M: Pujota hihnan päät vastakkaisten sivukiskojen läpi ja lukitse hihna paikalleen tarranauhalla.

Puhdistaminen

Puhdista antiseptisellä pesuaineella (pH 6–8) ja lämpimällä vedellä. Pyyhi kuivaksi pehmeällä liinalla. Älä käytä voimakkaasti hapanta tai emäksistä pesuainetta.

Tarkistaminen

Tarkista ennen käyttöä, että jalkahihna on puhdas ja ehjä.

Tekniset tiedot

Tuotenro	Kuvaus	UDI-DI	Mitat (L x P)	Paino	Materiaali
10-464	Jalkahihna	07350111832094	125 x 1670 mm	0,3 kg	Polyesteri
10-464-M	Jalkahihna	07350111832100	125 x 2410 mm	0,3 kg	Polyesteri



Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
RUOTSI

+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se