



Variant	Beskrivning
10-464	Benrem med vaddering, Hake och kardborrfäste
10-464-M	Benrem med vaddering, kardborrfäste



Läs användarmanualen innan du börjar använda produkten! Det är viktigt att du förstår innehållet fullt ut innan du försöker använda utrustningen.

CE

2021-04-16

Dokument nummer: M10-464SE rev.01

Avsedd användning

Benrem avsedd för att fixera patients ben under operation. Produkten är avsedd att användas av professionell personal inom kirurgi på vårdinrättningar.

Användarinstruktion

Användning

10-464: Fäst haken på ena sidan i sidoskenan. Trä andra änden med kardborre runt motsatta sidoskenan och lås remmen i önskat läge med kardborren.

10-464-M: Trä ändarna på remmen runt sidoskenan på respektive sida om operationsbordet. Spänn och lås remmen med kardborren.

Rengöring

Rengör med antiseptiskt tvåttvättmedel med pH 6 - 8 och varmt vatten. Torka med mjuk torkduk. Använd inte tvättmedel som innehåller starka syror eller baser.

Kontroll

Kontrollera innan användning att benremmen inte har några skador.

Teknisk specifikation

Artikelnr.	Beskrivning	UDI-DI	Dimension (B x L)	Vikt	Material
10-464	Benrem	07350111832094	125 x 1670 mm	0,3 kg	Polyester
10-464-M	Benrem	07350111832100	125 x 2410 mm	0,3 kg	Polyester



Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
SWEDEN

+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se