



Läs användarmanualen innan du börjar använda produkten! Det är viktigt att du förstår innehållet fullt ut innan du försöker använda utrustningen.

**CE**

2021-06-23

Dokument nummer: M10-465SE rev.01

## Avsedd användning

---

Benrem avsedd för att fixera patients ben under operation. Produkten är avsedd att användas av professionell personal inom kirurgi på vårdinrättningar.

## Användarinstruktion

---

### Användning

Lägg remmen över patienten. Trä ändarna på remmen runt tillbehörsskenan på var sida. Spänn och lås remmen genom att sammanföra kardborrebanden.

### Rengöring

Rengör med antiseptiskt tvåltvättmedel med pH 6 - 8 och varmt vatten. Torka med mjuk torkduk. Använd inte tvättmedel som innehåller starka syror eller baser.

### Kontroll

Kontrollera innan användning att benremmen inte har några skador.

## Teknisk specifikation

---

Artikelnr.	Beskrivning	UDI-DI	Dimension (B x L)	Vikt	Material
10-465	Benrem	07350111832117	85 x 2100 mm	0,3 kg	Terylene



Reison Medical AB  
Eriksbergsvägen 32A  
734 92 Hallstahammar  
SWEDEN

+46 (0)220 433 99 | [order@reison.se](mailto:order@reison.se) | [info@reison.se](mailto:info@reison.se)