



Läs användarmanualen innan du börjar använda produkten! Det är viktigt att du förstår innehållet fullt ut innan du försöker använda utrustningen.

CE

2020-10-30

Dokument nummer: M10-466SE rev.01

Avsedd användning

Benrem avsedd för att fixera patients ben under operation. Produkten är avsedd att användas av professionell personal inom kirurgi på vårdinrättningar.

Användarinstruktion

Användning

Lägg en ögla om sidoskenan på båda sidor om operationsbordet. Drag åt remmarna över patientens bed och lås genom att lägga samman kardborrebanden.

Rengöring

Rengör med antiseptiskt tvåttvättmedel med pH 6 - 8 och varmt vatten. Torka med mjuk torkduk. Använd inte tvättmedel som innehåller starka syror eller baser.

Kontroll

Kontrollera innan användning att benremmen inte har några skador.

Teknisk specifikation

Artikelnr.	Beskrivning	UDI-DI	Dimension (B x L)	Vikt	Material
10-466	Benrem	07350111832124	90 x 1500 mm	0,2 kg	Terylene



Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
SWEDEN

+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se