



Versio
10-468
10-468-L

Kuvaus
Jalkahihna jaetulle jalkalevyille, jalan ympärysmitta enintään 55 cm
Jalkahihna jaetulle jalkalevyille, jalan ympärysmitta enintään 70 cm



Lue käyttöohje ennen käyttöä! On tärkeää, että ymmärrät käyttöohjeen sisällön, ennen kuin yrität käyttää laitetta.

CE

2021-07-12

Asiakirjan numero: M10-468FI rev.01

Käyttötarkoitus

Jalkahihna on tarkoitettu potilaan jalan sijoittamiseen ja kiinnittämiseen jaettuun jalkalevyyn leikkauksen aikana. Tuote on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön terveydenhuollon yksikössä.

Käyttöohjeet

Käyttö

Kiinnitä kiskon liitoskappale jaetun jalkalevyn lisävarustekiskoon. Keskitä jalan kiinnityshihnat. Kierrä hihnan toinen pää jalkalevyn ympärille ja vie se kiskon liitoskappaleessa olevan aukon läpi ja lukitse hihna paikalleen tarranauhalla. Kierrä jalan kiinnityshihnat potilaan jalan ympärille ja lukitse paikalleen tarranauhalla.

Puhdistaminen

Puhdista antiseptisellä pesuaineella (pH 6–8) ja lämpimällä vedellä. Pyyhi kuivaksi pehmeällä liinalla. Älä käytä voimakkaasti hapanta tai emäksistä pesuainetta.

Tarkistaminen

Tarkista ennen käyttöä, että jalkahihna on puhdas ja ehjä.

Tekniset tiedot

Tuotenro	Kuvaus	UDI-DI	Mitat	Paino	Materiaali
10-468	Jalkahihna	07350111832148	105 cm pitkä kiinnityshihna Jalan ympärysmitta enintään 55 cm	0,8 kg	Teryleeni
10-468-L	Jalkahihna	07350111832155	105 cm pitkä kiinnityshihna Jalan ympärysmitta enintään 70 cm	0,8 kg	Teryleeni



Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
RUOTSI

+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se