



Version	Description
10-468	Sangle pour jambe pour plaque jambière articulée, tour de cuisse jusqu'à 55 cm
10-468-L	Sangle pour jambe pour plaque jambière articulée, tour de cuisse jusqu'à 70 cm



Veuillez lire le manuel d'instructions avant utilisation ! Il est important de bien comprendre le contenu du manuel d'instructions avant d'utiliser l'équipement.

CE

12-07-2021

Numéro du document : M10-468FR rév. 01

Utilisation prévue

Sangle pour jambe destinée à positionner et à fixer la jambe du patient sur une plaque jambière articulée pendant la chirurgie. Le produit doit être utilisé par des professionnels de la santé dans une structure médicale.

Instructions d'utilisation

Utilisation

Fixez le rail sur le rail porte-accessoires de la plaque jambière articulée. Centrez les sangles de fixation des jambes. Enroulez l'autre extrémité de la sangle autour de la plaque jambière, passez-la à travers l'ouverture au niveau de la fixation pour rail et maintenez la sangle en place avec la fermeture Velcro. Enroulez les sangles de fixation des jambes autour de la jambe du patient et attachez-les avec la fermeture Velcro.

Nettoyage

Nettoyez avec un détergent antiseptique dont le pH est compris entre 6 et 8 et de l'eau chaude. Essuyez avec un chiffon doux. N'utilisez pas de détergent acide ou alcalin puissant.

Contrôle

Vérifiez avant utilisation que la sangle pour jambe est propre et qu'elle n'est pas endommagée.

Spécifications techniques

Article n°	Description	UDI-DI	Dimensions	Poids	Matériau
10-468	Sangle pour jambe	07350111832148	Sangle de fixation 105 cm Tour de cuisse jusqu'à 55 cm	0,8 kg	Térylène
10-468-L	Sangle pour jambe	07350111832155	Sangle de fixation 105 cm Tour de cuisse jusqu'à 70 cm	0,8 kg	Térylène



Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
SUÈDE

+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se