



Wersja	Opis
10-468	Pasek na nogę do płyty udowej, obwód nogi do 55 cm
10-468-L	Pasek na nogę do płyty udowej, obwód nogi do 70 cm



Przed użyciem przeczytać podręcznik obsługi! Bardzo ważne jest całkowite zrozumienie treści podręcznika obsługi przed przystąpieniem do obsługi sprzętu.

CE

2021-07-12

Numer dokumentu: M10-468PL wer. 01

Przeznaczenie

Pasek udowy przeznaczony do pozycjonowania i mocowania nogi pacjenta na płycie udowej podczas zabiegu. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego przez pracowników służby zdrowia na terenie placówek opieki zdrowotnej.

Instrukcje dla użytkownika

Użycie

Przymocować mocowanie do szyny akcesoriów płyty udowej. Wyśrodkować paski mocujące nogi. Owinąć drugi koniec paska wokół płyty na nogę i przez otwór w mocowaniu szyny oraz zablokować pasek rzepem. Owinąć paski mocujące wokół nogi pacjenta i zablokować je rzepem.

Czyszczenie

Czyścić antyseptycznym środkiem czyszczącym o pH 6–8 i ciepłą wodą. Wytrzeć do sucha miękką szmatką. Nie stosować środków czyszczących silnie kwasowych bądź zasadowych.

Kontrola

Przed użyciem sprawdzić, czy taśma jest czysta i nieuszkodzona.

Dane techniczne

Numer artykułu	Opis	UDI-DI	Wymiary	Masa	Materiał
10-468	Taśma na nogę	07350111832148	Pasek mocujący 105 cm Obwód nóg do 55 cm	0,8 kg	Terylen
10-468-L	Taśma na nogę	07350111832155	Pasek mocujący 105 cm Obwód nóg do 70 cm	0,8 kg	Terylen



Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
SZWECJA
+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se