

Warnung! Dieses Symbol kennzeichnet wichtige sicherheitsrelevante Informationen. Befolgen Sie die hier aufgeführten Anweisungen genau.



Vor Verwendung die Bedienungsanleitung lesen! Es ist wichtig, dass Sie den Inhalt der Bedienungsanleitung vollständig verstehen, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

CE

2021-06-30

Dokumentnummer: M10-485DE Rev.01

Verwendungszweck

Hernienbrücke zur Verwendung unter dem Patienten als höhenverstellbare Stütze zur Positionierung z. B. bei Operationen an der Wirbelsäule. Das Produkt ist für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal in medizinischen Einrichtungen vorgesehen.




Sicherheitsvorschriften

Maximale Belastung: 75 kg (entspricht einem Patientengewicht von 180 kg) gemäß EN 60601-1 und EN 60601-2.

Kontrollieren Sie die ordnungsgemäße Funktion, bevor Sie das Produkt verwenden!

Achten Sie auf das Risiko des Kneifens/Zerquetschens während der Höhenverstellung.


Wartung und vorbeugende Instandhaltung sind autorisiertem Personal vorbehalten.

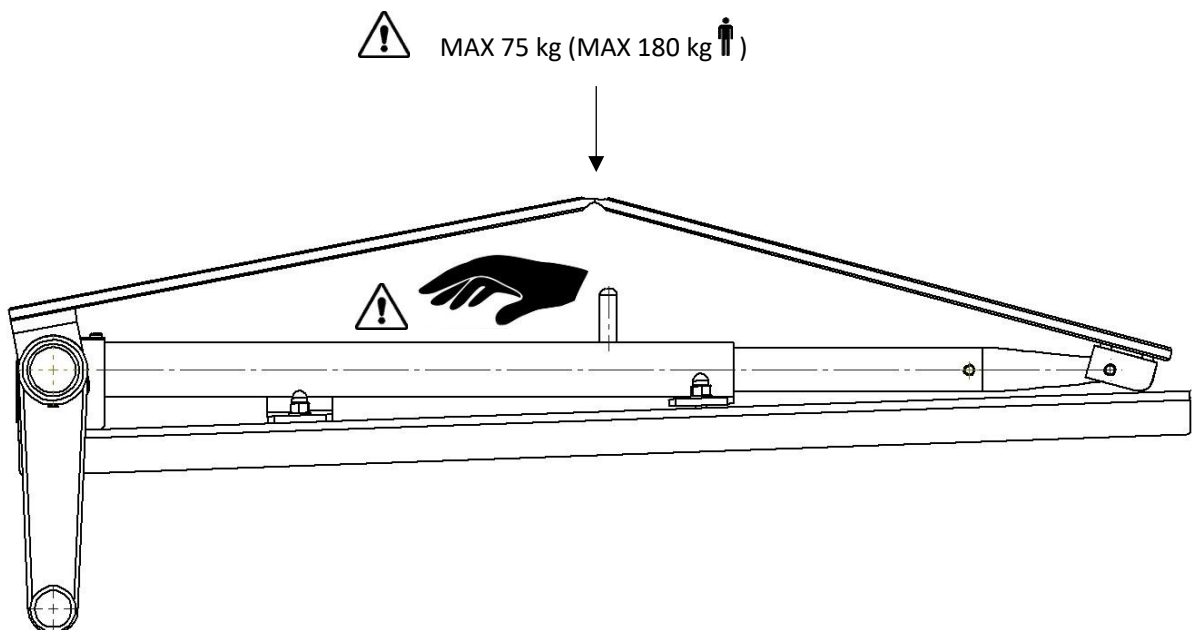


Nutzungshinweise

Montage

Passen Sie die Breite der Randstützen an die Breite des Operationstisches an.

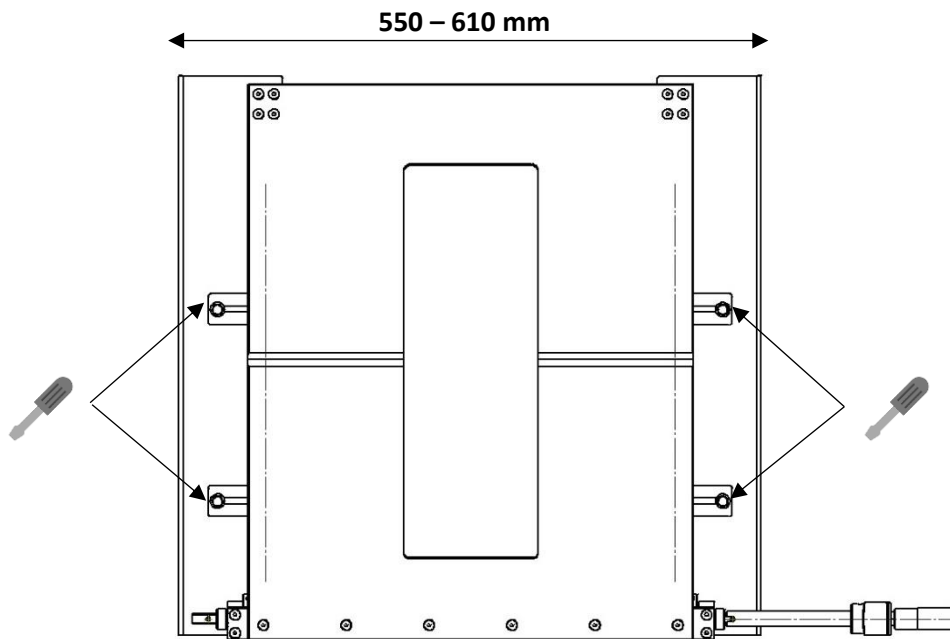

Positionsverstellung

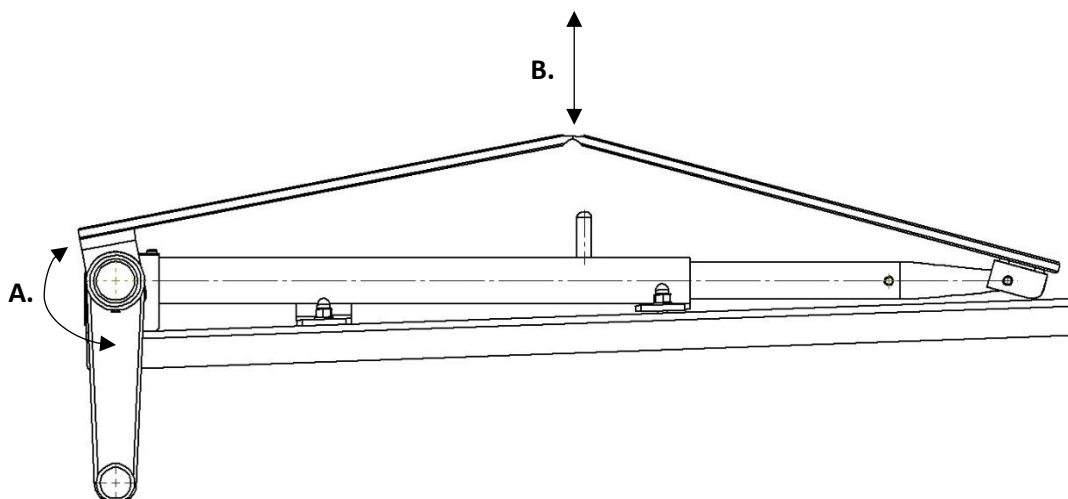

Wartung



Service, Wartung, Einstellung und Reparatur sind ausschließlich von autorisiertem Personal durchzuführen. Eine Änderung der Konstruktion ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers ist strengstens untersagt.

Reinigung

Mit antiseptischem Reinigungsmittel mit einem pH-Wert von 6-8 und warmem Wasser reinigen. Auf den Metallflächen kann Ethanol verwendet werden. Mit einem weichen Tuch abtrocknen. Verwenden Sie kein stark saures oder alkalisches Reinigungsmittel.


Kontrolle

Kontrollieren Sie, dass keine Teile lose oder beschädigt sind. Überprüfen Sie die Positionierungsfunktion der Hernienbrücke.

Jährliche Wartung

Einmal jährlich: Hernienbrücke sorgfältig reinigen, bewegliche Teile schmieren, Positionierfunktion überprüfen.

Ersatzteile

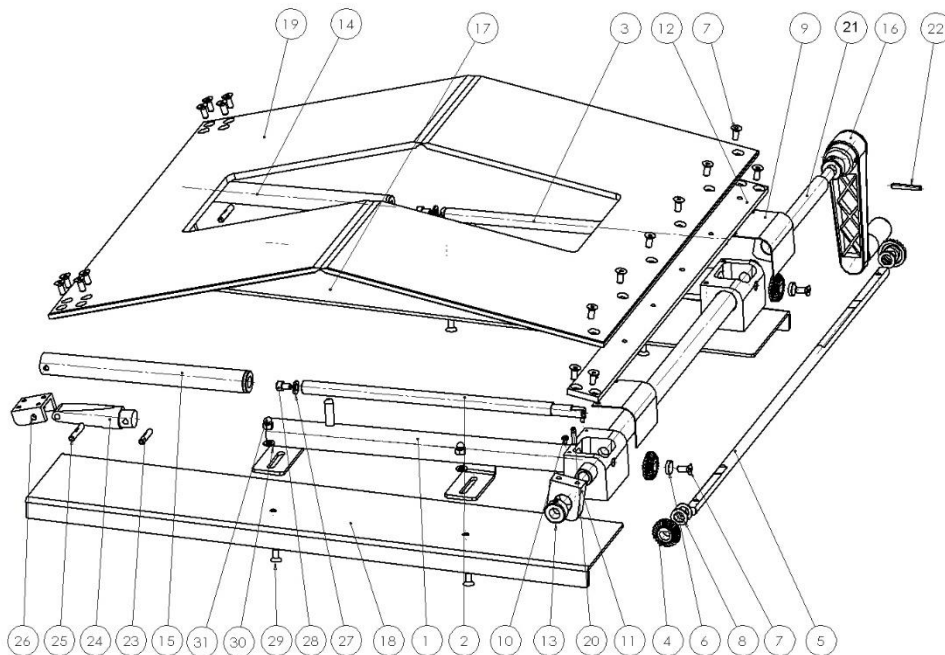

	Beschreibung	Anz.	Art.-Nr.
1.	Rahmen	1	10082
2.	Schraube mit Rechtsgewinde	1	10106
3.	Schraube mit Linksgewinde	1	10107
4.	Kegelrad	4	030183-A
5.	Welle	1	10110
6.	Scheibe BRB 8,4x16x1,5 FZB	2	-
7.	Schraube MF6S M5x12 A2	22	-
8.	Scheibe DB 10x16x1	4	-
9.	Abdeckung	2	10109
10.	Schraube MC6S M3x6 A2	4	-
11.	Scharnier	2	10112
12.	Schiene	1	10090
13.	Anschlagring 10x20x10 A2	2	-
14.	Rohr mit Linksgewinde	1	11143
15.	Rohr mit Rechtsgewinde	1	11144
16.	Kurbel	1	10102
17.	Kantenunterstützung rechts	1	10414HÖ
18.	Kantenunterstützung links	1	10414VÄ
19.	Platte	1	11199
20.	Hohlstift FRP 4x14	2	-
21.	Kurbelrohr	1	10852
22.	Hohlstift FRP 4x28	1	-
23.	Hohlstift RPD 5x25 A2	2	-
24.	Endstück	2	10113
25.	Hohlstift RPD 5x30 A2	2	-
26.	Scharnier	2	10108
27.	Scheibe BRB 6,4x12x1,5 FZB	2	-
28.	Schraube MC6S M5x8 FZ	2	-
29.	Schraube MF6S M5x12 A2	4	-
30.	Scheibe BRB 5,3x10x1	4	-
31.	Kappenmutter MHM5 A2	4	-

Technische Daten

Maximale Nutzlast	75 kg (entspricht einem Patientengewicht von 180 kg) gemäß EN 60601-1 und EN 60601-2
Material Nierenlift	Verchromter Stahl Edelstahl PP-Kunststoff
Gewicht	7,7 kg
Abmessungen (H x B x L)	80-190 x 550-610 x 550 mm
UDI-DI	07350111832469



Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
SCHWEDEN
+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se