

Advarsel! Dette symbolet viser til viktig sikkerhetsinformasjon. Følg disse instruksjonene omhyggelig.



Les brukerveiledningen før bruk! Det er viktig å ha forstått innholdet i brukerveiledningen fullt ut før du prøver å ta utstyret i bruk.

CE

2023-03-01

Dokumentnummer: M10-552/554NO rev.03

Tiltenkt bruk


Arm- og benbeskyttelse tiltenkt for å støtte og holde pasientens arm og ben på OR-bordet under kirurgi og transport. Produktet skal brukes av helsepersonell ved medisinske institusjoner.



Sikkerhetsforskrifter

Maksimal belastning: 10 kg jevnt fordelt, i henhold til EN 60601-1 og EN 60601-2.

Kontroller riktig funksjon før bruk!

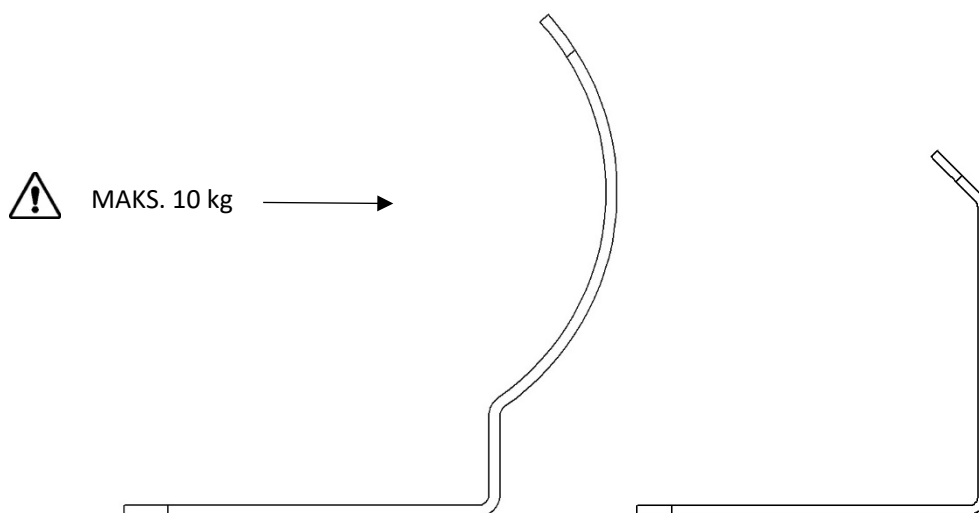

Bruksanvisning

Montering

Arm- og benbeskyttelsen er plassert med den flate enden under madrassen på OR-bordet. Arm- og benbeskyttelsen holdes på plass av patentvekten.

Rengjøring

Rengjøres med antiseptisk rengjøringsmiddel med pH 6–8 og varmt vann. Etanol kan brukes. Tørkes med en myk klut. Sterkt syreholdige eller alkaliske vaskemidler skal ikke brukes.

Kontroll

Kontroller at ingen deler er skadet. Hvis det brukes trekk, må det kontrolleres at det er rent og uten skader.

Tilbehør

Artikkelnr.	Beskrivelse
10-553	Polstret trekk for 10-552
10-555	Polstret trekk for 10-554
10-557	Polstret trekk for 10-556

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelnr.	UDI-DI	Maksimal belastning	Mål (H x B x L)	Vekt	Materiale
10-552	07350111831646	10 kg	230 x 230 x 565 mm	1,5 kg	PETG
10-554	07350111831660	10 kg	210 x 200 x 400 mm	0,9 kg	PETG
10-556	07350111832667	10 kg	230 x 230 x 300 mm	0,8 kg	PETG



Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
SVERIGE
+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se