


Kol ve bacak koruyucu 10-552/554/556

REISON
MEDICAL

TÜRKÇE

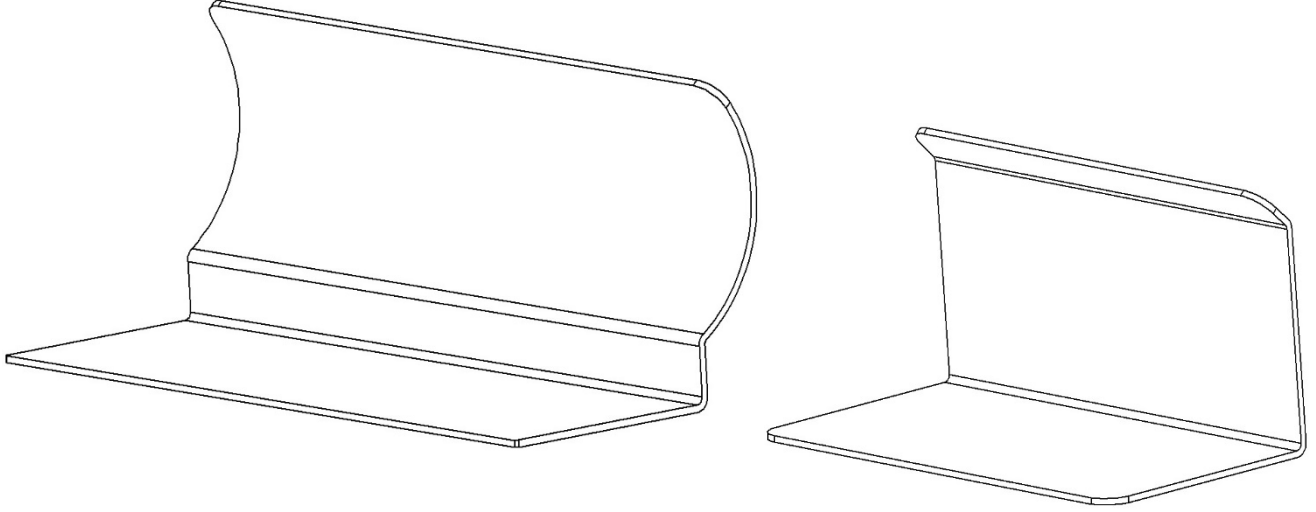

Uyarı! Bu sembol, güvenlikle ilgili önemli bilgileri belirtmektedir. Bu talimatlara dikkatle uyun.



Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzunu okuyun! Ekipmanı kullanmayı denemeden önce kullanım kılavuzunun içeriğini tam olarak anlamak önemlidir.

CE

2023-03-01

Belge numarası: M10-552/554TR rev.03

Kullanım amacı

Ameliyat ve nakil sırasında hastanın kolunu ve bacağına ameliyat masası üzerinde destekleme ve sabit tutma amaçlı kol ve bacak koruyucu. Ürün bir sağlık tesisi içinde tıp uzmanları tarafından kullanılacaktır.




Güvenlik yönetmeliği

Maksimum yük: EN 60601-1 ve EN 60601-2'ye göre eşit dağılımda 10 kg.

Kullanmadan önce, doğru şekilde çalıştığından emin olun!



MAKS. 10 kg →

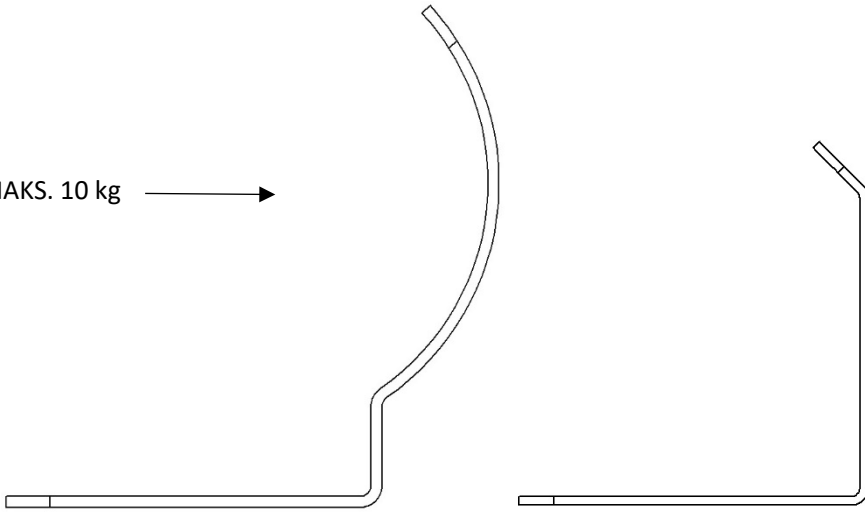

Kullanıcı talimatları

Kurulum

Kol ve bacak koruyucu, düz ucu ameliyat masasındaki döşegin altına gelecek şekilde konumlandırılır. Kol ve bacak koruyucu patent ağırlığına göre yerinde tutulur.

Temizleme

pH derecesi 6 - 8 olan antiseptik deterjan ve ılık su ile temizleyin. Etanol kullanılabilir. Yumuşak bir bezle kurulaşın. Güçlü asidik veya alkali deterjanlar kullanmayın.

Kontrol

Hiçbir parçada hasar bulunmadığını kontrol edin. Kapak kullanılmışsa, temiz olduğunu ve hasar görmediğini kontrol edin.

Aksesuarlar

Madde no.	Açıklama
10-553	10-552 için yastıklı kapak
10-555	10-554 için yastıklı kapak
10-557	10-556 için yastıklı kapak

Teknik özellikler

Madde no.	UDI-DI	Maksimum yük	Boyutlar (Y x A x U)	Ağırlık	Malzeme
10-552	07350111831646	10 kg	230 x 230 x 565 mm	1,5 kg	PETG
10-554	07350111831660	10 kg	210 x 200 x 400 mm	0,9 kg	PETG
10-556	07350111832667	10 kg	230 x 230 x 300 mm	0,8 kg	PETG



Reison Medical AB

Eriksbergsvägen 32A

734 92 Hallstahammar

ISVEÇ

+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se