

Хірургічний стіл для операції на руці 10-396, включно з версіями



Версія	Опис
10-396	Затискач (рейка ЄС 25x10 мм)
10-396-S	Затискач (рейка ЄС 25x10 мм), без матраца
10-396-US	Затискач (рейка США 1½ x ¾ дюйма)
10-396-UK	Затискач (рейка Велика Британія 1½ x ¾ дюйма)



Увага! Цей символ позначає важливу інформацію, пов'язану з безпекою. Уважно дотримуйтесь цих інструкцій.



Перед використанням прочитайте інструкцію з експлуатації! Перед використанням обладнання важливо повністю зрозуміти зміст інструкції з експлуатації.

CE

2025-04-04

Номер документа: M10-396 UA, в. 03

Цільове використання

Хірургічний стіл для розміщення руки пацієнта під час хірургічного лікування руки та кисті.
Товар призначений для використання медичними працівниками в медичних закладах.



Правила безпеки

Максимальне робоче навантаження:
Без опорної ніжки: 20 кг при рівномірному розподілі, що відповідає вазі пацієнта 270 кг, відповідно до стандартів EN 60601-1 та EN 60601-2.


З опорною ніжкою: 40 кг при рівномірному розподілі, що відповідає вазі пацієнта 270 кг, відповідно до стандартів EN 60601-1 та EN 60601-2.


Перед використанням переконайтесь у правильному функціонуванні!

При розблокуванні важеля блокування для регулювання висоти підтримайте стіл знизу, щоб запобігти його неконтрольованому опусканню в нижнє положення.

Під час транспортування зніміть стіл для операції на руці!

Технічне обслуговування та профілактичний ремонт повинні виконуватися уповноваженим персоналом.

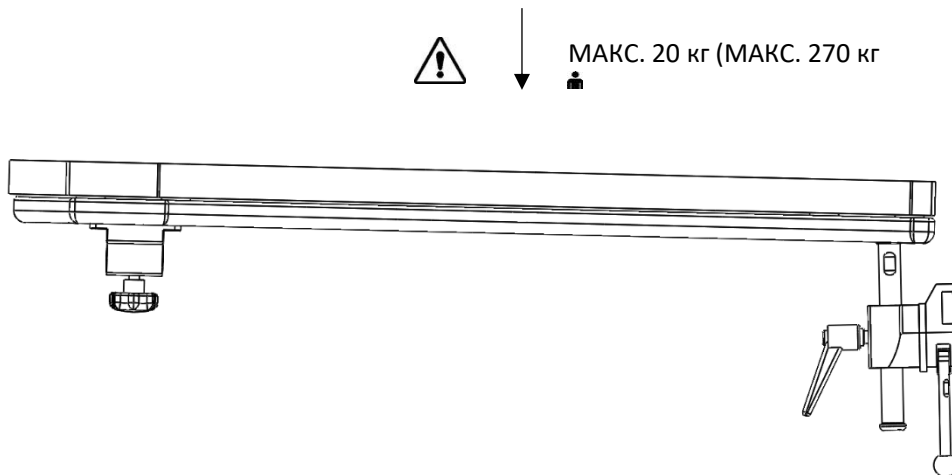

⚠ ↓ МАКС. 40 кг (МАКС. 270 кг )




Інструкція користувача

Встановлення

1.



2.

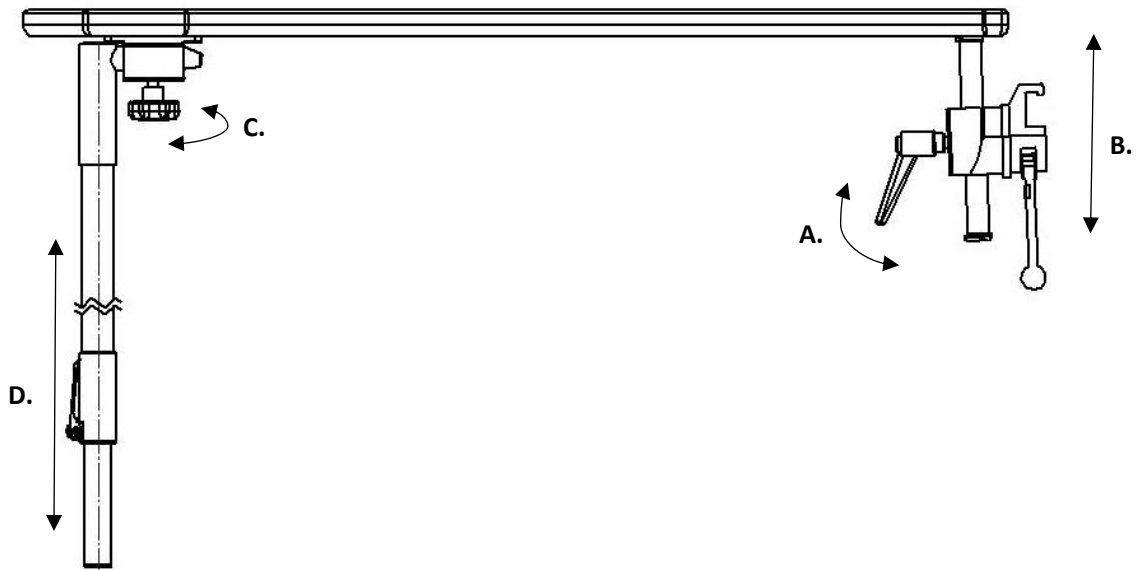

Технічне обслуговування

Обслуговування, профілактика, регулювання та ремонт повинні виконуватися виключно уповноваженим персоналом. Зміна конструкції без письмової згоди виробника суворо заборонена.

Очищення

Очищайте антисептичним мийним засобом з рН 6-8 і теплою водою. Можна використовувати етанол. Протріть насухо м'якою тканиною. Не використовуйте сильноокислі або лужні мийні засоби.


Контроль

Перевірте, чи немає вільних деталей або пошкоджень на будь-якій деталі. Функція блокування перевіряється шляхом блокування та розблокування верхньої частини в різних положеннях. Якщо використовується подушка, переконайтеся, що вона чиста й не пошкоджена.

Щорічне обслуговування

Один раз на рік слід ретельно очищати стіл для операції на руці, змащувати рухомі частини та перевіряти функцію блокування.

Запасні частини

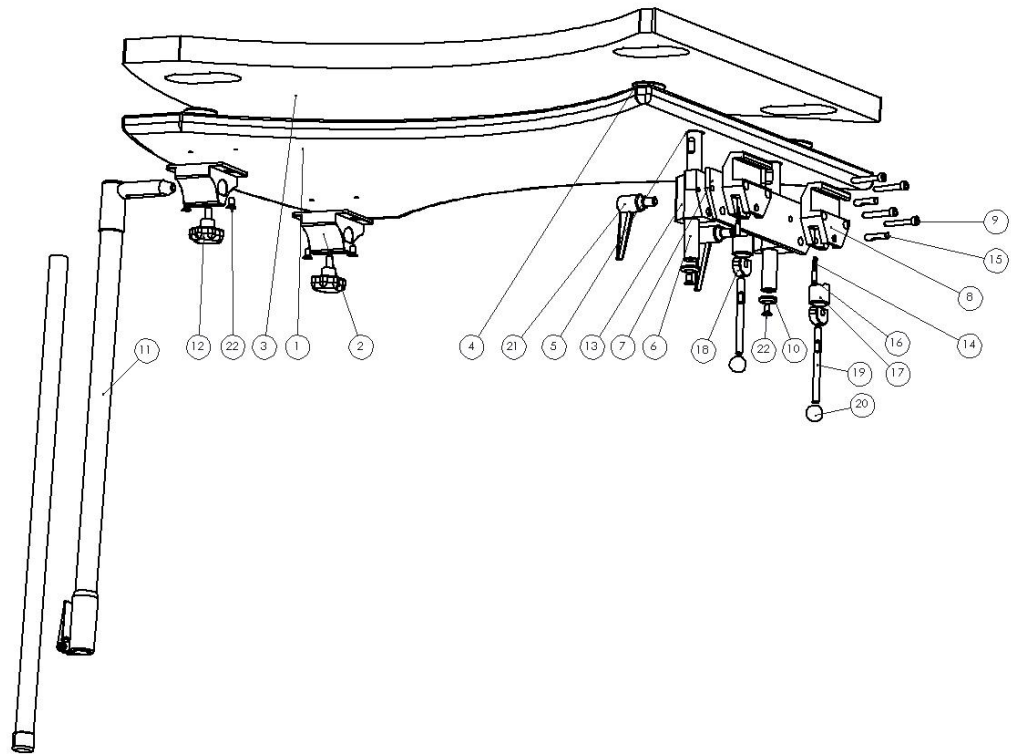

Опис	Версія:		
	10-396	10-396-S	
	Деталі	Стаття №	Стаття №
1. Пластина	1	10912	10912
2. Посібник	2	10687	10687
3. Матрац	1	10-397	-
4. Кріплення матраца	4	11364	11364
5. Шайба BRB 10,5x22x2 A2	2	-	-
6. Опора	2	10968	10968
7. Планка	1	10966	10966
8. Корпус затискача	2	ЄС: 10031	
		США:	
		10547	ЄС: 10031
		Велика Британія:	
9. Гвинт MC6S 6x40 FZB	4	-	-
10. Шайба	2	10004	10004
11. Опорна ніжка	1	10998	10998
12. Ручка VCT.43-р M8x16 м'яка	2	-	-
13. Посібник	2	10053	10053
14. Пружина	2	10013	10013
15. Вал	2	10009	10009
16. Натискний штифт	2	10012	10012
17. Плунжер	2	10711	10711
18. Ексцентрик	2	11165	11165
19. Важіль блокування	2	10014	10014
20. Куля	2	K20M8S	K20M8S

21.	Регульований важіль блокування	2	6-593-65	6-593-65
22.	Гвинт MF6S 6x12 A2	6	-	-

Технічна специфікація

Максимальне робоче навантаження Без опорної ніжки: 20 кг при рівномірному розподілі, що відповідає вазі пацієнта 270 кг, відповідно до стандартів EN 60601-1 та EN 60601-2.

З опорною ніжкою: 40 кг при рівномірному розподілі, що відповідає вазі пацієнта 270 кг, відповідно до стандартів EN 60601-1 та EN 60601-2.

Вага (включно з опорною ніжкою) 5,6 кг

Розміри (В x Ш x Д) 720-1150 x 525 x 820 мм

Матеріали хірургічного стола для операції на руці Вуглецеве волокно
Алюміній
Нержавіюча сталь

Версія	UDI-DI
10-396	07350111830809
10-396-S	07350111830854
10-396-UK	07350111830861
10-396-US	07350111830885



Reison Medical AB

Eriksbergsvägen 32A

734 92 Галльстагаммар

ШВЕЦІЯ

+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se