
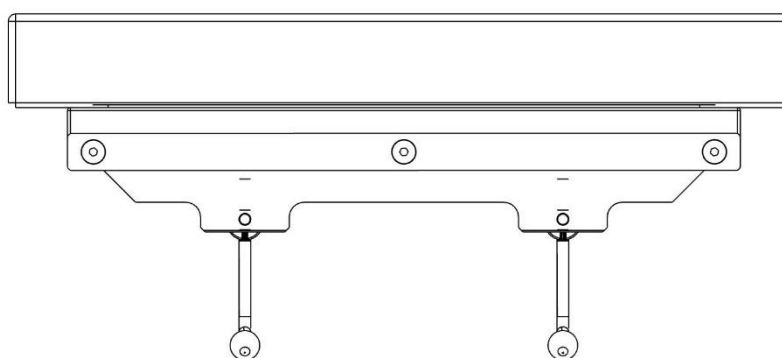


Secção de alargamento

10-421, 10-422, 10-423, 10-425

Secção de alargamento 10-421, 10-422, 10-423, 10-425, incluindo versões

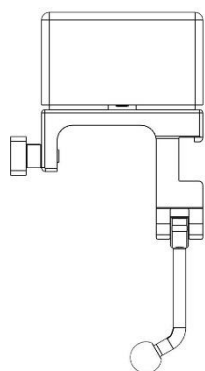

Versão	Descrição
10-421	Alargamento 105 x 240 mm (calha EU 25x10 mm), par incl. colchão
10-421-S	Alargamento 105 x 240 mm (calha UE 25x10 mm), par excl. colchão
10-422	Alargamento 105 x 455 mm (calha UE 25x10 mm), par excl. colchão
10-422-S	Alargamento 105 x 455 mm (calha UE 25x10 mm), par excl. colchão
10-423	Alargamento 105 x 500 mm (calha UE 25x10 mm), par incl. colchão
10-423-S	Alargamento 105 x 500 mm (calha UE 25x10 mm), par excl. colchão
10-425	Alargamento 105 x 300 mm (calha UE 25x10 mm), par incl. colchão
10-425-S	Alargamento 105 x 300 mm (calha UE 25x10 mm), par excl. colchão



Aviso! Este símbolo indica informações importantes relacionadas com segurança. Seguir atentamente estas instruções.



Ler o Manual do utilizador antes de utilizar! É importante compreender totalmente o conteúdo do manual do utilizador antes de tentar utilizar o equipamento.



22/10/2024

Número do documento: M10-421/422/423/425 PT rev.02

Utilização prevista

Secção de alargamento destinada a alargar a área das costas e da anca na mesa de operações para permitir o tratamento de doentes maiores. Este produto deve ser utilizado por profissionais médicos, no interior de uma unidade de cuidados de saúde.




Regras de segurança

Carga máxima: 50 kg distribuídos por igual, o que corresponde a um paciente com um peso de 300 kg, de acordo com as normas EN 60601-1 e EN 60601-2.


Verificar se está a funcionar corretamente antes de utilizar!

Os serviços e manutenção preventiva devem ser feitos por pessoal qualificado.

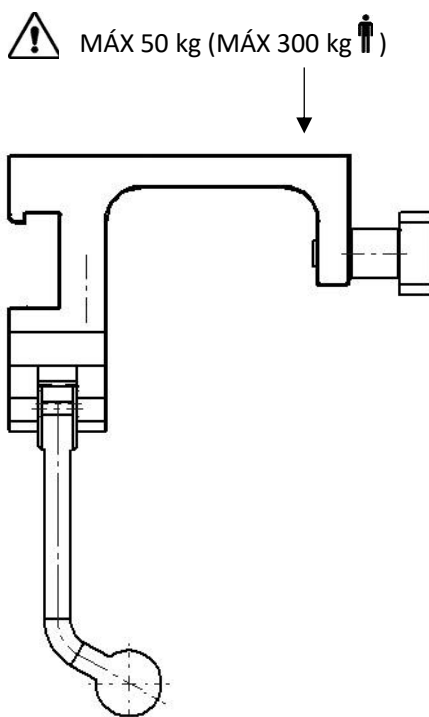

Instruções de utilização

Instalação

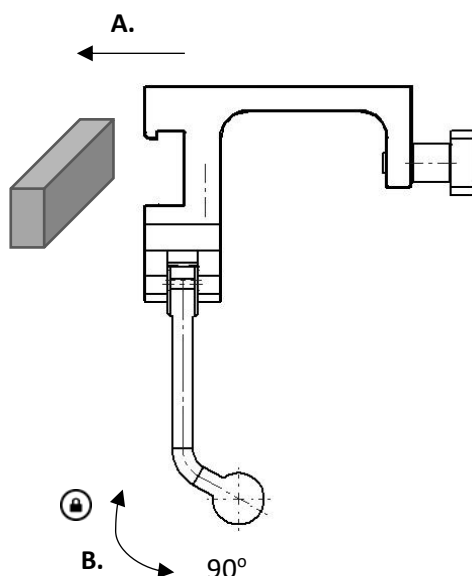

Manutenção



Os serviços, manutenção preventiva, ajustamentos e reparações devem ser feitos apenas por pessoal qualificado. É estritamente proibido alterar a construção sem uma autorização por escrito do fabricante.

Limpeza

Limpar com água morna e um detergente antisséptico com um pH 6 - 8. Também pode ser utilizado etanol nas superfícies de metal. Secar com um pano macio e seco. Não utilizar detergentes ácidos ou alcalinos fortes.


Verificações

Verificar se não há peças soltas e se nenhuma peça da secção de alargamento tem danos. Verificar a função de bloqueio. Se o colchão vai ser utilizado, verificar se está limpo e não está danificado.

Serviço anual de manutenção

Uma vez por ano, limpar cuidadosamente a secção de alargamento, lubrificar todas as peças móveis e testar a função de bloqueio.

Peças sobressalentes

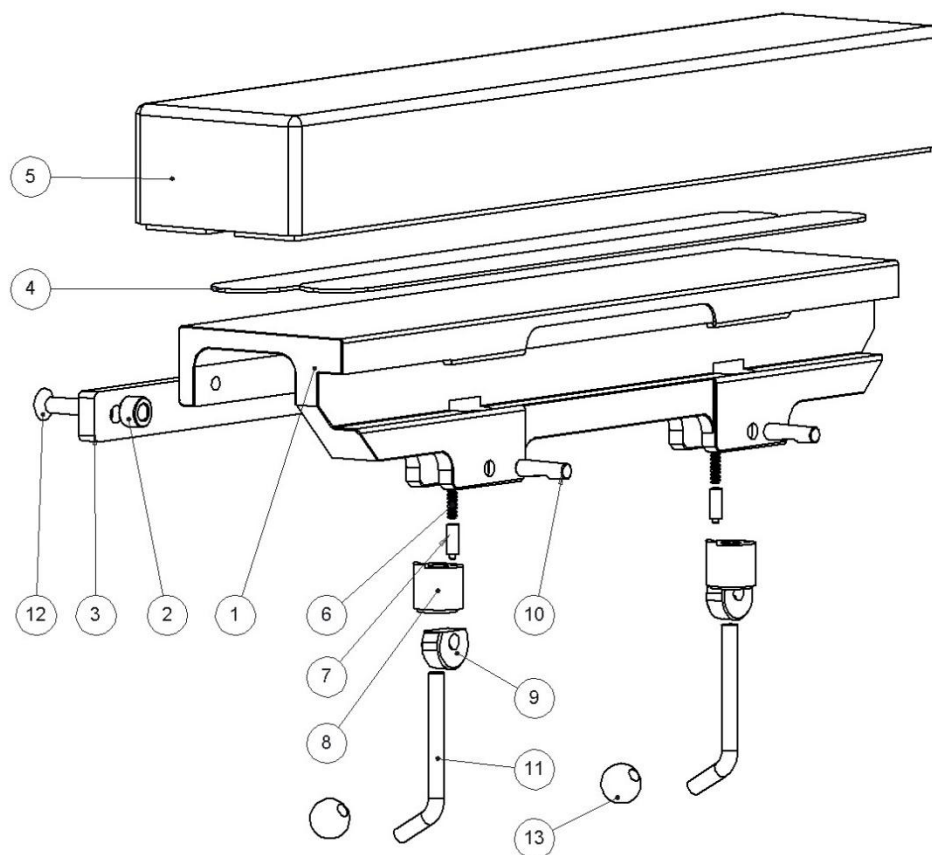

	Versão: 10-421 10-421-S 10-422 10-422-S 10-423 10-423-S 10-425 10-425-S								
Descrição	Unid.	Artigo n.º	Artigo n.º	Artigo n.º	Artigo n.º	Artigo n.º	Artigo n.º	Artigo n.º	Artigo n.º
1. Perfil da estrutura	1	10653	10653	10604	10604	10731	10731	11205	11205
2. Espaçador	2-3	10652	10652	10652	10652	10600	10600	10600	10600
3. Calha	1	10654	10654	10650	10650	10658	10658	11207	11207
4. Correia de velcro	2	10712	-	10709	-	10726	-	11209	-
5. Colchão	1	10714	-	10710	-	10723	-	11206	-
6. Mola	1-2	10013	10013	10013	10013	10013	10013	10013	10013
7. Pino de pressão	1-2	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012	10012
8. Êmbolo	1-2	10711-1	10711-1	10711-1	10711-1	10711-1	10711-1	10711-1	10711-1
9. Excêntrico	1-2	10015	10015	10015	10015	10015	10015	10015	10015
10. Veio	1-2	10009	10009	10009	10009	10009	10009	10009	10009
11. Alavanca de bloqueio	1-2	10014	10014	10014	10014	10014	10014	10014	10014
12. Parafuso MF6S M8x30 A2	2-3	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Esfera	1-2	K20M8S	K20M8S	K20M8S	K20M8S	K20M8S	K20M8S	K20M8S	K20M8S

Acessórios

Artigo n.º	Descrição	Funciona com
10714	Colchão, altura 60 mm	10-421
10714-80	Colchão, altura 80 mm	10-421
10710	Colchão, altura 60 mm	10-422
10710-80	Colchão, altura 80 mm	10-422
10723	Colchão, altura 80 mm	10-423
11206	Colchão, altura 60 mm	10-425

Especificações técnicas

Carga operacional máxima	50 kg distribuídos por igual, o que corresponde a um paciente com um peso de 300 kg, de acordo com as normas EN 60601-1 e EN 60601-2.
Secção de alargamento de materiais	Alumínio Aço inoxidável

Versão	UDI-DI	Dimensões (A x L x C)	Peso
10-421	07350111832209	150 x 125 x 240 mm	2,4 kg
10-421-S	07350111832483	90 x 125 x 240 mm	2,3 kg
10-422	07350111832223	150 x 125 x 455 mm	4,5 kg
10-422-S	07350111832490	90 x 125 x 455 mm	4,3 kg
10-423	07350111832247	170 x 125 x 500 mm	4,8 kg
10-423-S	07350111832254	90 x 125 x 500 mm	4,6 kg
10-425	07350111832261	150 x 125 x 300 mm	2,9 kg
10-425-S	07350111832278	90 x 125 x 300 mm	2,8 kg



Reison Medical AB

Eriksbergsvägen 32A

734 92 Hallstahammar

SUÉCIA

+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se