


Slanghållare 10-613 inklusive varianterna

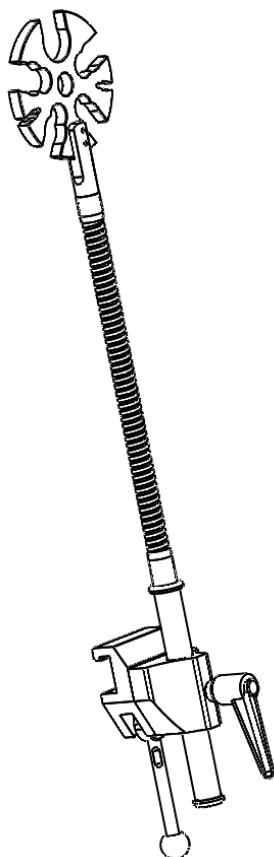

Variant	Beskrivning
10-613	Slanghållare utan klove
10-613-EU	Klove (EU 25x10 mm skena)
10-613-US	Klove (US 1 $\frac{1}{8}$ " x $\frac{3}{8}$ " skena)
10-613-UK	Klove (UK 1 $\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{4}$ " skena)
10-613-10	Längre slanghållare (600 $\pm$ 30 mm)



Varning! Denna symbol indikerar särskilt viktig säkerhetsinformation. Följ dessa anvisningar noga.



Läs användarmanualen innan du börjar använda produkten! Det är viktigt att du förstår innehållet fullt ut innan du försöker använda utrustningen.



2026-09-02

Dokument nummer: M10-613SE rev.05

Senaste ändring

Maxbelastningen för 10-613, 10-613-EU, 10-613-UK och 10-613-US har ändrats till 0,7 kg, CR-26-010.

Avsedd användning

Slanghållare avsedd att samla och hålla slangar och kablar från utrustning som används vid undersökningar och kirurgiska ingrepp. Produkten är avsedd att användas av professionell personal inom kirurgi på vårdinrättningar.

Säkerhetsföreskrifter




Maxbelastning: 0,7 kg på flex-armen för 10-613, 10-613-EU, 10-613-UK och 10-613-US
1 kg för 10-613-10

Utför en funktionskontroll före varje användningstillfälle!


Service och förebyggande underhållsservice skall utföras av auktoriserad personal.

Användarinstruktion

Installation

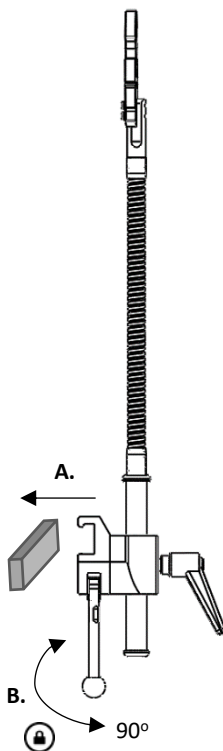

Användning

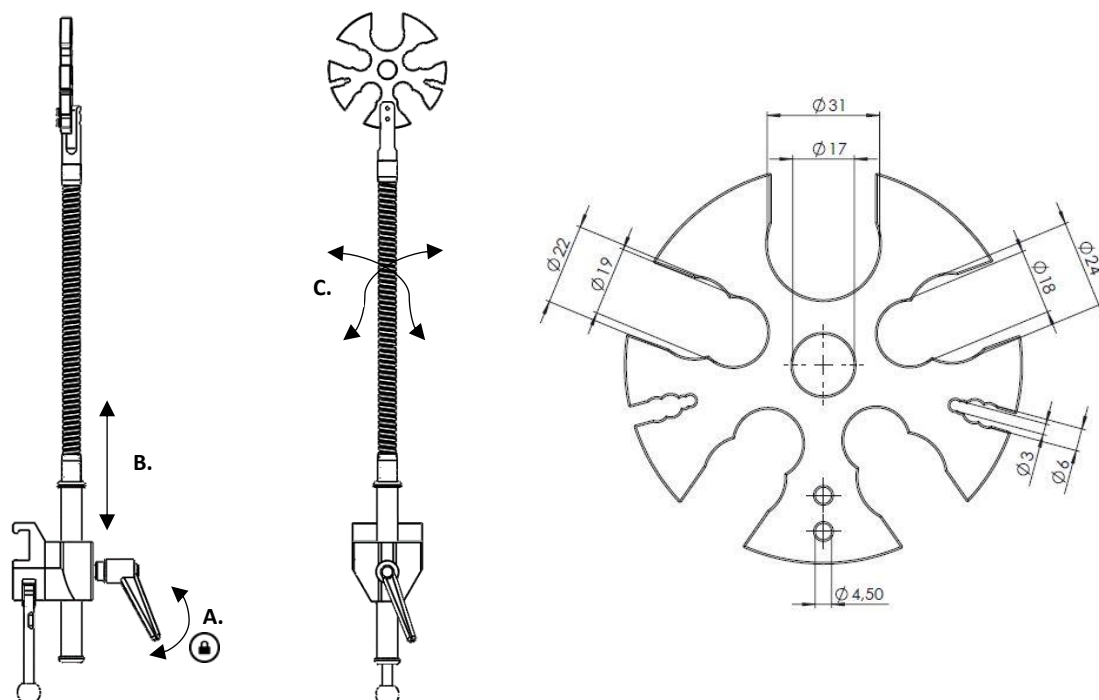

Underhåll

Service, förebyggande underhåll, justeringar och reparationer får endast utföras av för ändamålet utbildad personal. Ändring av någon del av konstruktionen utan skriftligt medgivande från tillverkaren är strängt förbjudet. Överträdelse kan komma att beivras.

Rengöring

Rengör med antiseptiskt tvåttvättmedel med pH 6 - 8 och varmt vatten. Etanol kan användas. Torka med mjuk torkduk. Använd inte tvättmedel som innehåller starka syror eller baser.


Kontroll

Kontrollera att inga skador finns på slanghållaren. Kontrollera funktionen på kloven.

Årlig service

Varje år skall slanghållaren genomgå en noggrann rengöring, se ovan. Rörliga delar och gängor skall smörjas med vattenfast fett. Låsfunktionerna skall kontrolleras.

Reservdelar

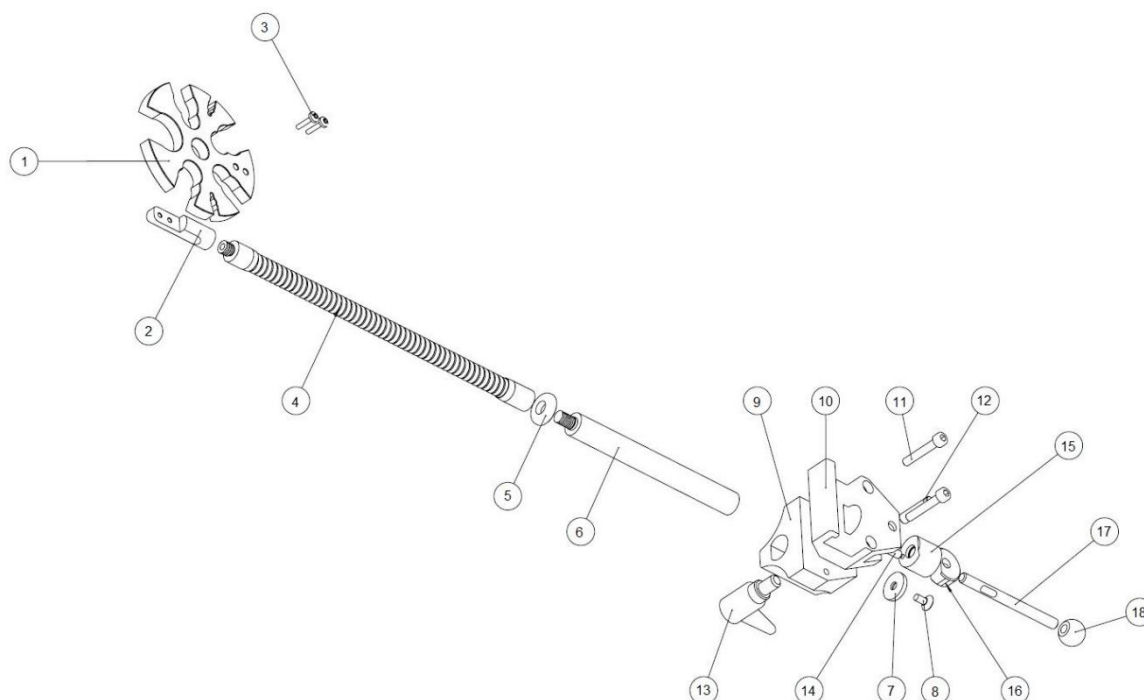

		Variant:	10-613	10-613-10	10-613-EU	10-613-US	10-613-UK
Beskrivning		Antal	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.
1.	Hållare	1	12345	12345	12345	12345	12345
2.	Fäste	1	12349	12349	12349	12349	12349
3.	Skruv	2	MK6S M4x16 A2	MK6S M4x16 A2	MK6S M4x16 A2	MK6S M4x16 A2	MK6S M4x16 A2
4.	Svanhals	1	22270-300-55	22800-300-55	22270-300-55	22270-300-55	22270-300-55
5.	Bricka	1	11265	11265	11265	11265	11265
6.	Stolpe	1	12350	12350	12350	12350	12350
7.	Bricka	1	10004	10004	10004	10004	10004
8.	Skruv	1	MF6S M6x12 A2	MF6S M6x12 A2	MF6S M6x12 A2	MF6S M6x12 A2	MF6S M6x12 A2
9.	Styrning	1	-	10053	10053	10053	10053
10.	Hus	1	-	10031	10031	10547	10543
11.	Skruv	2	-	MC6S M6x45 FZ	MC6S M6x45 FZ	MC6S M6x45 FZ	MC6S M6x45 FZ
12.	Axel	1	-	10009	10009	10009	10009
13.	Ställbar låsspak	1	-	6-593-65	6-593-65	6-593-65	6-593-65
14.	Tryckstift	1	-	10012	10012	10012	10012
15.	Fjäderpaket	1	-	10711	10711	10711	10711
16.	Excenter	1	-	11165	11165	11165	11165
17.	Låsspak	1	-	10014	10014	10014	10014
18.	Kula	1	-	K20M8S	K20M8S	K20M8S	K20M8S

Teknisk specifikation

Artikelnr.	UDI-DI	Maxbelastning på flex-arm	Dimension (H x B x L)	Vikt	Material
10-613	07350111832728	0,7 kg	610 x 110 x 25 mm	0,7 kg	Rostfritt stål PMMA Aluminium
10-613-EU	07350111832735	0,7 kg	610 x 110 x 120 mm	1,3 kg	
10-613-US	07350111832742	0,7 kg	610 x 110 x 120 mm	1,3 kg	
10-613-UK	07350111832759	0,7 kg	610 x 110 x 120 mm	1,3 kg	
10-613-10	07350111833053	1 kg	910 x 110 x 120 mm	1,7 kg	



Reison Medical AB

Eriksbergsvägen 32A

734 92 Hallstahammar

SWEDEN

+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se